

Informationen für den Behandler - Hinweise zum Einsetzen der Schiene

Für die Wirkung der Schiene ist die Retention der Schiene auf den Zähnen wichtig. Bitte stellen Sie die Retention zu Beginn etwas stärker ein, denn sie lässt bei regelmäßigem Gebrauch der Schiene materialbedingt nach.

In der ersten Kontrollsitzung ist die Retention zu überprüfen.

Die Retention kann nur durch Einschleifen des Kunststoffes reduziert werden. Eine Steigerung der Retention durch Unterfüttern ist nicht möglich. Es muss eine neue Schiene angefertigt werden.

Bei der Eingliederung sollte die Retention jedes Zahnes überprüft werden. Die Einschubrichtung und das Verhalten der Retention bei eingesetzter Schiene mit eingestellter Protrusion sind zu beachten.